

本署檔號 OUR REF.: S/F (23) DH/MDCO/18-25/2
來函檔號 YOUR REF.:
電話 TEL.: 3107 8483
傳真 FAX: 3157 1286

執事先生：

病人升降架的安全通告

我們注意到市面上附有傾斜電動促動器的流動病人升降架，其電動促動器可能出現突發故障而導致病人升降架的吊杆塌下，並可能引致病人及護理人員嚴重受傷。

英國藥物及保健產品規管局亦就這類病人升降架的安全性問題發佈了安全通告。閣下可從以下網址獲取相關資料：

www.mhra.gov.uk/Publications/Safetywarnings/MedicalDeviceAlerts/CON008417

此安全通告(只提供英文本)亦隨信附上，以供閣下參考。

這類故障，很多時是受其使用量(起重週期的數量)而不是其使用年期所影響。操作不當、使用不當或缺乏保養亦可導致電動促動器的鑲嵌位置受損或物料疲勞。可是，市面上的病人升降架在設計上一般均沒有附設起重週期的計算器，加上電動促動器密封式的設計，使內部檢驗有一定困難。因此，用者並不容易在電動促動器發生故障前知悉它已耗損。

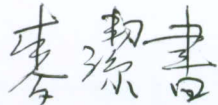
我們建議 閣下：

- (1) 聯絡供應商/提供維修保養的機構，向他們索取有關病人升降架的技術性資料，如病人升降架的使用期限及保養標準；
- (2) 僱用合適的人員定期為病人升降架作維修保養及檢查；
- (3) 定期估計電動促動器的使用量或定期為電動促動器進行風險評估(最少每年一次)，並決定應否更換新的電動促動器。

病人升降架必須適當地管理及維修，為員工及病人提供一個安全的環境。請把此重要信息傳遞給相關同事/員工。

如有疑問請致電 3107 8467，向梁姑娘查詢。

香港特別行政區政府衛生署署長

(麥潔書  代行)

二〇〇八年四月十七日

附件

竭誠服務 顧客為本 素質為先

We are committed to providing client-oriented service